

HIT 2021 ! Przełomowa technologia dla zdrowej i pięknej skóry

NOWOCZESNE OCZYSZCZANIE WODOROWE !

Wielowymiarowy zabieg **HydroMASTER H2+™**



Infuzja aktywnego wodoru molekularnego

Idealne oczyszczenie - działa także jak **Odmladzający Nieinwazyjny Zastrzyk Wodoru** powstrzymujący reaktywne wolne rodniki.

Zabieg oczyszczania wodorowego polega na abrazji (oczyszczeniu) skóry głowicą wodną typu vortex z obrotowym strumieniem wody pod ciśnieniem, nasyconej wodorem i w tym czasie wprowadzaniu w głąb skóry mikroskopijnych cząsteczek aktywnego wodoru.

1

NIEINWAZYJNY ZASTRZYK WODORU

dla skóry - opóźnianie procesów starzenia

2

INNOWACYJNE ZABIEGI DO KAŻDEGO RODZAJU CERY

6 rodzajów zabiegu w 1

3

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Głębokie Wodorowe
Oczyszczenie,
Regeneracja i Lifting w
jednym zabiegu



Głowice do aktywnego oczyszczania, regeneracji i infuzji



Pojemniki do roztworów oczyszczających



Tytanowe przetworniki umożliwiają produkcję jonów aktywnego wodoru

Ten rewolucyjny zabieg dostarcza bezpośrednio do skóry cząsteczki **wodoru**, które **oczyszczają** ją na poziomie komórkowym. Wodór jako najmniejszy i najlżejszy pierwiastek, może przenikać w głębokie struktury skóry, łącząc się z reaktywnym tlenem, powszechnie znanym jako wolne rodniki i unieszkodliwiając go.

HydroMASTER H2™ wspomaga neutralizację aktywnego oxygenu, który jest głównym źródłem problemów skórnych oraz regeneruje komórki skóry.

ANTYOKSYDACYJNA aktywność wodoru jest bowiem :

176 razy większa niż witaminy C

863 razy większa niż koenzymu Q

431 razy większa niż witaminy E !



Ponadto w procesie neutralizacji reaktywnego tlenu, który łączy się z cząsteczkami wodoru, w tkance powstaje woda, co dodatkowo czyni cały proces intensywnie nawilżającym skórę od środka !




Aktualnie na świecie wielu naukowców bada wykorzystanie wodoru do leczenia różnych problemów zdrowotnych.

Wskazania:

Rewolucyjna technologia odnowy skóry przy użyciu aktywnego wodoru jest idealna do zapobiegania starzeniu i dlatego rekomendowana dla każdego typu klientów, zwłaszcza tych z cerą zmęczoną, dojrzałą, z przebarwieniami, zmarszczkami czy skórą atopową. Główne sfery działania zabiegu to:

- przeciwdziałanie starzeniu skóry (neutralizacja wolnych rodników, ujędrnienie i odmłodzenie skóry)
- problemy skórne (tj. trądzik, zaskórniki, zwiększona produkcja sebum, cera naczynekowa)
- dogłębne oczyszczenie i odświeżenie skóry
 - jako zabieg antyśmogowy - oczyszczanie skóry twarzy z zanieczyszczeń !
 - redukcja zmarszczek mimicznych, cieni i opuchlizny pod oczami
 - zabieg HydroREGEN™ jest też idealnym zabiegiem **przed/po agresywnych zabiegach, np. laserowych, po których powstaje w w skórze duży stres oksydacyjny.**

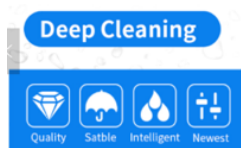



Pełny zabieg składa się z 6 etapów.

Etap I – Eksfoliacja wstępna

Peeling kawitacyjny delikatnie usuwa martwe komórki naskórka za pomocą ultradźwięków. Ten etap zabiegu oczyszcza skórę oraz odżywia ją poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych i poprawę krążenia. Przygotowuje ją do następnego etapu - intensywnego oczyszczania wodorowego.




Etap II – Intensywne oczyszczanie wodorowe

Wodór oczyszcza skórę na poziomie komórkowym. Redukuje i neutralizuje wolne rodniki, odpowiedzialne za starzenie się skóry. Uderzając pod ciśnieniem w powierzchnię skóry, cząsteczki wodoru jako najmniejsze i najlżejsze cząsteczki we wszechświecie, nie mają problemu z przenikaniem pod naskórek.

Etap III – Infuzja aktywnych preparatów specjalną głowicą InFusion™

Po dokładnym oczyszczeniu skóry wykonujemy infuzję substancji aktywnych w głąb skóry. Odżywcze składniki są rozpuszczone w wodzie, która pod ciśnieniem rozbija się na miliony cząsteczek, co ułatwia przenikanie aktywnych preparatów do skóry.

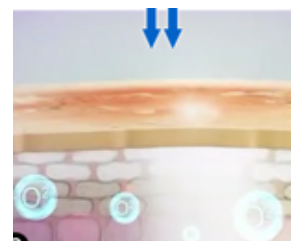

Etap IV – Właczanie substancji aktywnych za pomocą głowicy ultradźwiękowej

Ultradźwięki zwiększają przepuszczalność błon komórkowych, rozszerzają naczynia krwionośne oraz polepszają metabolizm komórkowy.

Etap V – Fala radiowa bipolarna

Diatermiczna fala radiowa obkurcza włókna kolagenowe, zwiększa napięcie skóry, poprawia jej elastyczność oraz spistość, dając efekt liftingu

Etap VI – Masaż głowicą krioaktywną

Schłodzenie skóry masażem głowicą chłodzącą jest końcowym etapem zabiegu. Rozgrzana i zaczerwieniona po intensywnych zabiegach infuzyjnych skóra pod wpływem kriomasażu odzyskuje swój właściwy kolor, nabiera zdrowego blasku i promienności.


Można pominąć poszczególne etapy lub stosować je zamiennie.

Oprócz oczyszczania wodorowego HydroREGEN™ umożliwia wykonywanie zabiegów **hydradermabrazji lub hydropeelingu**, wykorzystując preparaty do hydradermabrazji lub delikatne roztwory oczyszczające i peelingujące.

- Działanie na poziomie komórkowym, przy jednoczesnym dotlenieniu i oczyszczeniu skóry daje efekt zarówno natychmiastowy, jak i długofalowy
- Zabieg bezpieczny, nieinwazyjny i bezbolesny
- Skóra jest odżywiona, nawilżona, rozświetlona i pełna blasku - może służyć jako zabieg bankietowy

INFORMACJE - ZADZWOŃ pod nr: 787 002 004 lub 721 258 403

Leasing od 180 zł/ mc

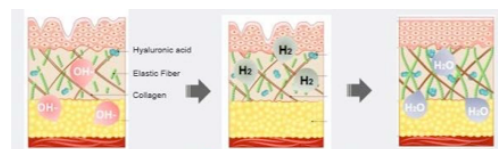

CERTYFIKAT ORYGINALNOŚCI